


Informasjonsbrosjyre til bruker

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus

Nøyaktig registrering
av insulindoser kan
gjøres hvor som helst

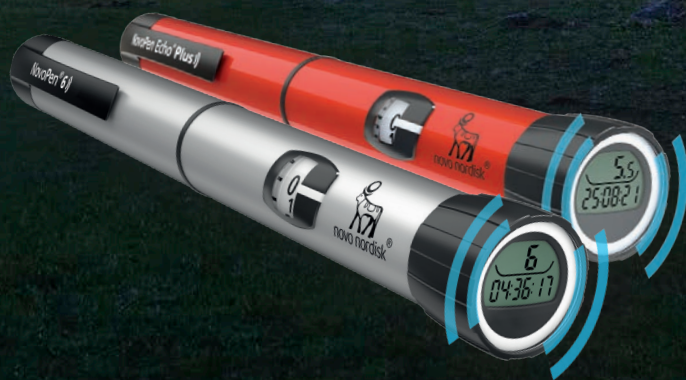

Hva er NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

NovoPen® 6



NovoPen Echo® Plus



NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er flergangspenner med et digitalt display og minnefunksjon. Pennene registrerer automatisk både tid siden forrige injeksjon ble satt og hvor mange enheter som ble injisert – slik at du slipper å gjøre det.

Pennens minnefunksjon lagrer de 800 siste injeksjonene, og disse kan overføres til kompatible apper på din smarttelefon via nærfeltkommunikasjon (NFC). På displayet på pennen kan du alltid sjekke din siste injeksjon.

Her er et eksempel på avlesning av displayet på pennen:



Forrige injeksjon

12 enheter

Tid siden forrige injeksjon

1 time, 52 minutter og 3 sekunder

Hvorfor bruke NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?



Hjelper deg å huske dose og tid siden forrige injeksjon



Nedlastning av injeksjonshistorikk til kompatible apper



Se injeksjonshistorikken sammen med selvmålt blodsukker eller glukosedata fra kontinuerlig glukosemåling (CGM)*



Enkelt å dele injeksjonshistorikken med din behandler. Slik at du kan få persontilpassede behandlingråd.**



Pennene krever ingen lading, og har en levetid på 4-5 år.***

Dette gjør NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus til et miljøvennelig valg.

* Forutsetter bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM).

** Overføring av injeksjonshistorikk til din behandlers datasystem forutsetter at du ønsker å dele disse opplysningene.

*** Garanti på 3 år.

Kom i gang med bruk av din NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus

- 1 Bruk pennen som vist i pakningsvedlegget som medfølger din penn. Se også instruksjonsfilm for bruk av pennen ved å scanne QR-koden på siden 11.
- 2 Sjekk din siste injeksjon på pennens display.
- 3 Last ned en NovoPen® 6- og NovoPen Echo® Plus-kompatibel app på din smarttelefon eller nettbrett.*
Se hvilke apper som er kompatible med pennene på neste side.
- 4 Overfør injeksjonshistorikken fra pennen til den aktuelle enheten via nærfeltskommunikasjon (NFC).
- 5 Se injeksjonshistorikken sammen med glukosedata i appen.**
Fra appen kan du enkelt dele din injeksjonshistorikk med din behandler.

* Hvis du allerede bruker en NovoPen® 6- eller NovoPen Echo® Plus-kompatibel app, trenger du ikke å laste ned på nytt.

** Forutsetter bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM). For oversikt over tilgjengelige CGM systemer i Norge og deres rangering i anbudet, se <https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler/insulinpumper-cgm-og-forbruksmateriell-#produkter-pa-avtale>.

Hvordan overføre data via nærfeltkommunikasjon (NFC)?

Injeksjonsdata fra NovoPen®6 og NovoPen Echo® Plus kan overføres via NFC (nærfeltkommunikasjon), hvor NFC punktet på telefonen befinner seg vil variere fra telefon til telefon.

På de fleste iPhone modeller vil NFC punktet være på forsiden av telefonen. På de fleste Android modeller vil NFC punktet være på baksiden av telefonen.



Tips ved overføring av injeksjonsdata til din smarttelefon

- Sjekk at din telefon støtter bruk av NFC*
- Sjekk at dosetelleren står på 0. Det er ikke mulig å overføre injeksjonshistorikken hvis dosetelleren ikke står på 0.
- Legg telefonen på et flatt og stødig underlag, og plasser pennen på NFC punktet.
- Sørg for at pennen står i midten av NFC punktet.
- Unngå å bevege eller flytte på pennen under overføringen, da dette kan føre til at overføringen blir ufullstendig.

* For en fullstendig oversikt over hvilke mobilenheter og operativsystemer (OS) som har blitt testet og er compatible med NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus se <https://www.novonordisk.no/smartpens.html>

Kompatible apper



Glooko®



**FreeStyle
LibreLink**



mySugr®



glooko[®]

Glooko - Track Diabetes Data

Last ned appen via App store eller Google Play.

Med Glooko[®] kan injeksjonsdata fra NovoPen[®] 6 og NovoPen Echo[®] Plus vises sammen med glukosedata fra tilkoblede blodsuktermålere og kontinuerlige glukosemålere (CGM).

Glooko + Dexcom

Injeksjonsdata fra NovoPen[®] 6 og NovoPen Echo[®] Plus kan vises sammen med data fra Dexcom G6[®] ved å bruke Glooko*. Dexcom G6[®] må kobles til Glooko via pasientens brukerprofil på Glooko.no.

For mer informasjon om Glooko,
skann QR-koden

Nettsiden du kommer til ved å skanne QR-koden drives og eies av Glooko. Novo Nordisk står ikke ansvarlig for innholdet på denne nettsiden. Glooko[®] er et varemerke som eies av Glooko, og brukes med tillatelse.



* Deling av data fra pennen forutsetter at pasienten ønsker å dele disse dataene og gir sitt samtykke til dette.



FreeStyle LibreLink 
LibreView

FreeStyle LibreLink - NO

Last ned appen via App store eller Google Play.

Injeksjonsdata fra NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus kan overføres til FreeStyle LibreLink appen. I appen kan injeksjonsdataen sees sammen med glukosedata fra FreeStyle Libre 2-sensoren. Fra FreeStyle LibreLink appen kan data enkelt deles med helsepersonell via LibreView*.

For mer informasjon om FreeStyle LibreLink, skann QR-koden

Nettsiden du kommer til ved å skanne QR-koden drives og eies av Abbott. Novo Nordisk står ikke ansvarlig for innholdet på denne nettsiden. FreeStyle, Libre og relaterte varemerker eies av Abbott og brukes med tillatelse.



* Deling av data fra pennen forutsetter at pasienten ønsker å dele disse dataene og gir sitt samtykke til dette.



mySugr - Diabetessporerlogg

Last ned appen via App store eller Google Play.

I mySugr® appen kan injeksjonsdata fra NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus lastes ned og sees sammen med blodsukkermålinger fra Accu-Chek® Guide Me*.

For mer informasjon om mySugr®, skann QR-koden

Nettsiden du kommer til ved å skanne QR-koden drives og eies av Roche. Novo Nordisk står ikke ansvarlig for innholdet på denne nettsiden. mySugr® er et varemerke som eies av Roche, og brukes med tillatelse.



* Deling av data fra pennen forutsetter at pasienten ønsker å dele disse dataene og gir sitt samtykke til dette.

Hva er NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

NovoPen® 6



NovoPen Echo® Plus



- › Digitalt display som viser dose og tid siden forrige injeksjon
- › Minnefunksjon som lagrer de siste 800 injeksjonene
- › Pennene krever ingen lading eller bytte av batteri*
- › Refusjon via HELFO**

- › **Maksdose:** 60 enheter
- › **Dosesteg:** 1 enhet

- › **Maksdose:** 30 enheter
- › **Dosesteg:** 0,5 enheter

* Garantitid på 3 år.

** Refusjon via HELFO ved resept på forbruksmateriell ved diabetes §5, punkt 4.

Instruksjonsfilmer for bruk av NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus



Se instruksjonsfilmene om NovoPen® 6
og NovoPen Echo® Plus her



For fullstendig bruksanvisning for bruk av NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus se pakningsvedlegget som følger med din penn. Ved spørsmål om behandling med NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus ta kontakt med din behandler.

Ved spørsmål om pennene ta kontakt med
Novo Nordisk Norge sitt kundesenter. Tlf: +47 22 18 50 51
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

Du kan også lese
mer om smarte
insulinpennner her
novonordisk.no



NO23NIP60002_20-feb 2023



Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
www.novonordisk.no · NO 918 229 353 MVA

NovoPen® 6) NovoPen Echo® Plus)